

Aide-mémoire à la livraison des AudiPack

Sommaire :

- Le concept EarPro par l'AudiPack
- Votre Equipement antibruit EarPro
- La première mise en place
- Le nettoyage des adaptateurs silicone
- Les nouvelles sensations auditives avec l'EarPro
- Le plus important !



Le concept EarPro par l'AudiPack

➤ Le concept EarPro par l'AudiPack

- Votre équipement antibruit EarPro
- La première mise en place
- Le nettoyage des adaptateurs silicone
- Les sensations avec l'EarPro
- Le plus important !

AudiPack



Kit FastMatrix



Livraison de votre commande d'AudiPack

Réalisation des moulages par votre distributeur

Réalisation des adaptateurs au laboratoire AudiTech

Filtre EarPro à Clipser déjà présent dans l'AudiPack

Retour de vos adaptateurs sur mesure en silicone



Votre Equipement antibruit EarPro

- Le concept EarPro par l'AudiPack
- **Votre équipement antibruit EarPro**
- La première mise en place
- Le nettoyage des adaptateurs silicone
- Les sensations avec l'EarPro
- Le plus important !



Pince
vêtement
de sécurité

Filtres
déclipables et
poignée
ergonomique

Repère pour
l'adaptateur
oreille droite

Embouts Silicones
réalisés suivant les
matrices des oreilles
des personnes selon
le procédé breveté
FastMatrix

La première mise en place

- Le concept EarPro par l'AudiPack
- Votre équipement antibruit EarPro
- **La première mise en place**
- Le nettoyage des adaptateurs silicone
- Les sensations avec l'EarPro
- Le plus important !



Mettre l'adaptateur silicone dans l'entrée du conduit auditif



Faire $\frac{1}{4}$ de tour vers l'arrière, puis $\frac{1}{4}$ de tour vers l'avant pour mettre le crochet dans son logement afin de verrouiller la position de votre antibruit.



Vous pouvez utiliser pour les premières insertions le gel EarClean fourni dans le kit utilisateur afin de les mettre plus facilement.

Le nettoyage des adaptateurs silicone

- Le concept EarPro par l'AudiPack
- Votre équipement antibruit EarPro
- La première mise en place
- **Le nettoyage des adaptateurs silicone**
- Les sensations avec l'EarPro
- Le plus important !

Nettoyage :

Déclipser les filtres des adaptateurs silicone sur mesure, frotter dans vos mains les adaptateurs silicone à l'eau du robinet avec un savon doux, bien rincer à l'eau claire, souffler sur les adaptateurs si de l'eau reste à l'intérieur. Laisser sécher, puis reclipser les filtres. Ne pas utiliser de savon chargé ou abrasif.



➔ *Ne pas mettre à l'eau les filtres, les nettoyer à l'occasion avec un papier essuie tout humide ou une lingette.*

➔ *Produit d'Hygiène en option :
Boîte de 20 Pastilles EarClean Caps
Boîtes de 15 Lingettes EarClean Towels*



Les nouvelles sensations avec l'EarPro

- Le concept EarPro par l'AudiPack
- Votre équipement antibruit EarPro
- La première mise en place
- Le nettoyage des adaptateurs silicone
- **Les nouvelles sensations auditives avec l'EarPro**
- Le plus important !

L'habituation :

- Le temps pour s'accoutumer à la forme des adaptateurs dans vos oreilles est généralement de 2 heures à 2 jours.
- Le temps pour s'habituer à la nouvelle audition que procure les filtres est de l'ordre d'une semaine à 10 jours.

Vous devez porter les antibruit en continu pour passer cette période d'adaptation.



Les sensations d'autophonie (s'entendre parler), de martellement quand on marche, d'entendre le vent à l'extérieur, de régler sa voix quand on parle s'estomperont rapidement avec le temps.

Les utilisateurs habituels d'antibruit obturant type casque ou bouchon en mousse peuvent avoir au début la sensation d'être moins bien protégé avec les EarPro.

Une gêne est toujours possible au début, mais il ne doit pas y avoir bien sûr de douleur!

Le plus important !



- Le concept EarPro par l'AudiPack
- Votre équipement antibruit EarPro
- La première mise en place
- Le nettoyage des adaptateurs silicone
- Les sensations avec l'EarPro
- **Le plus important !**

➔ Il est bon de rappeler que seul le port de vos protections Antibruit EarPro pendant toute la durée du travail (donc potentiellement votre exposition aux bruits) vous permettra de combattre efficacement la maladie professionnelle de surdité.

➔ Cette surdité se manifestera inévitablement après 15 à 20 ans d'exposition sans protection ou avec une protection partielle, par la difficulté irréversible de comprendre correctement les paroles de vos proches !!

➔ La surdité professionnelle est une maladie et non un accident du travail, elle intervient après plusieurs années d'exposition.